

Har du frågor

Om du har frågor vänligen kontakta ansvarig läkare/sköterska (se tidigare informationsbrev till dig) eller kontakta tillverkaren Aprox AB.

 Allt material är miljövänligt och brännbart

 Tillverkad för engångsbruk

Qvintip®
Artikel nr. 10-001

Tillverkare:
Aprox AB
Virdings allé 32B
754 40 Uppsala
Telefon 018-57 24 90
info@aprox.se
www.aprox.se

© Copyright 2007 Aprox AB. Version 2.1-R.

aprox

Qvintip®
by aprox

Du erbjuds en

hälsokontroll för att förebygga livmoderhalscancer

Bruksanvisning för Qvintip
– självprovtagning i hemmet

Allmän information

Materialet som erhålls vid denna provtagning kommer endast att användas för att påvisa humant papillomvirus (HPV). Det kommer inte att sparas i någon biobank.

Med provtagningen identifieras de kvinnor som eventuellt har en HPV-infektion. Dessa kvinnor kommer i första hand att bli föremål för ytterligare provtagning. De flesta HPV-infektioner är av övergående natur.

De kvinnor som har en långvarig infektion med HPV i underlivet löper ökad risk att få cellförändringar och senare i livet eventuellt drabbas av livmoderhalscancer.

De kvinnor som har HPV-infektion och cellförändringar kan behandlas och därigenom undvika cancer.

Resultatet av undersökningen kommer att sändas hem till dig. Om provet visar tecken på HPV-infektion bör vidare utredning ske.

Provet bör helst returneras inom två veckor.

Provhandlingen är sekretesskyddad.

CE

Observera – för smidig självprovtagning

- Observera att Qvintip är tillverkad för **engångsbruk**. Hantera därför provtagaren med försiktighet och **endast enligt bruksanvisning**.
- Provtagarens spets, den vita delen, **får inte vinklas** eller lösgöras före själva provtagningen.
- Vid ovarsamhet riskerar den vita delen att lossna under provtagningen. Om detta mot förmodan skulle inträffa kan du själv lugnt ta ut den vita delen, lägga den i röret och skicka in provet (se "Har du frågor").

Var god vänd

Anvisning för provtagningen

Före användning kontrollera att ditt namn står på ytterförpackningen och att produkten är oskadad (blåvit självprovtagare, numrerat provrör med lock, returkuvert, bruksanvisning).

För att provtagningen skall ske smidigt och säkert bör självprovtagaren hanteras försiktigt och endast enligt


denna anvisning. Håll provtagaren rak både när du för in och tar ut den ur slidan (vagina).

Provtagningen kan utföras i stående eller liggande ställning. Undvik provtagning under menstruation.


Provtagning kan utföras under de 3 första månaderna av en graviditet.




1 Lyft ut provtagaren genom att ta i det blå handtaget. Håll provpinnen rak under provtagningen.

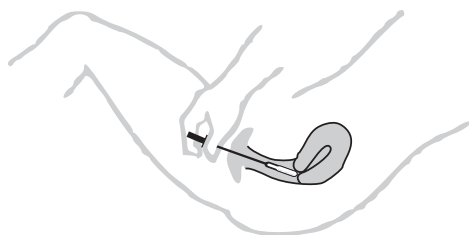


2 För in provpinnen i slidan tills det tar stopp (ca 10–15 cm)
– snurra provpinnen ett varv
– för ut provpinnen (håll den rak)

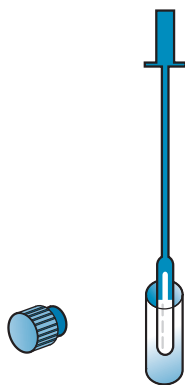


3 Sätt ned den vita delen av provpinnen i röret.

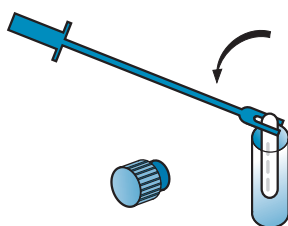

4 Vinkla provpinnen så att den vita delen faller ner i röret.

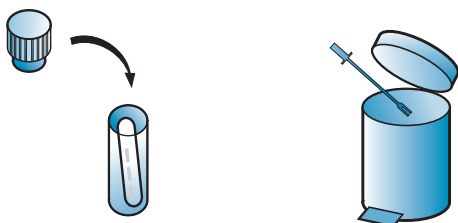

5 Sätt på locket på röret och kasta den blå delen av pinnen.

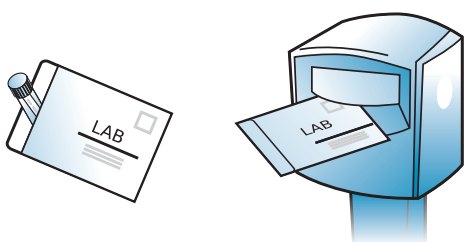

6 Lägg röret i returkuvertet. Förslut kuvertet och lägg det i en brevlåda.

Observera! Se även avsnittet "Observera – för smidig provtagning" på föregående sida.